

Reinigungs- und Desinfektions- Richtlinien



Inhaltsverzeichnis

1. Klassifizierung	Seite 2
2. Durchführungszyklen	Seite 2
3. Reinigung	Seite 2
4. Desinfektion	Seite 3
5. Reinigungs- und Desinfektionmittel	Seite 3

1. Klassifizierung

Bei den Produkten der UDAPTION®- Serie handelt es sich um „nicht kritische Medizinprodukte“. Sie sind für Anwendungsfälle vorgesehen, bei dem die Nutzenden nur mit intakter Haut und nicht mit Schleimhaut in Kontakt geraten. Nutzende mit verletzter Haut müssen zum Schutz der verletzten Haut Gummihandschuhe tragen. Die mitgeltenden Dokumente - Bedienungsanleitung, Allgemeine Sicherheits- und Warnhinweise, sowie die Wartungsanweisung finden Sie unter „www.udaption.com“ unter dem jeweiligen Produkt zum downloaden.

2. Durchführungszyklen

Abhängig vom Nutzungsumfeld und der Nutzungsintensität kommt es zu unterschiedlichen Verschmutzungen in Art und Umfang. Grundsätzlich sind alle Verunreinigungen die für die Gesundheit der Nutzer und Anwender und/oder für die Funktionssicherheit des Produktes eine Gefahr darstellen, umgehend zu beseitigen.

Eine regelmäßige Reinigung in monatlichen Abständen ist auch dann empfehlenswert, wenn keine äußeren Verschmutzungen zu erkennen sind.

Bei einem Wiedereinsatz (Weitergabe des Hilfsmittels an einen Folgenutzer) ist das Reinigen mit anschließender Desinfektion Pflicht.

3. Reinigung



Das Reinigen eines UDAPTION®-Produktes umfasst das Entfernen von anhaftenden Verschmutzungen (wie z.B. Blut, Proteine, Staub, Fett/Öl und Anderes), üblicherweise mit reinigungsmittelversetztem Wasser, an Oberflächen, Spalten, Rillen und Verbindungsstücken. In diesem Zusammenhang können Lappen und Bürsten mit Naturborsten (keine Metallborsten) zum Einsatz kommen.

3.1 Demontage des Produktes

Wenn es sich bei dem UDAPTION®-Produkt um ein demontierbares Produkt handelt (siehe Anleitung „Montage und Bedienen“ des Produktes), dann muss dies vor der Reinigung in seine Bestandteile demontiert werden. Die Demontage betrifft nur die Teile, die WERKZEUGFREI zu separieren sind. Alle Gelenke sind nur äußerlich zu reinigen, die Gelenkhälften dürfen nicht voneinander getrennt werden.

3.2 Vorreinigung

Entfernen Sie grobe Verschmutzungen mit einem feuchten Lappen bzw. mittels Bürste oder Ähnlichem.

3.3 Reinigung

Sprühen Sie alle Teile mit einer Reinigungslösung ein und wischen Sie mit einem Lappen über alle Oberflächen.

3.4 Abspülen

Spülen Sie anschließend alle Teile mit Wasser ab, um Rückstände der Reinigungslösung zu entfernen.

3.5 Trocknen

Trocknen Sie anschließend alle Teile sorgfältig ab. Verwenden Sie dazu fusselfreie Lappen oder Einweg-Papierhandtücher.

3.6 Montage

Montieren Sie nun das Produkt gemäß der zugehörigen Montageanleitung, falls keine anschließende Desinfektion gewünscht/notwendig ist.

4. Desinfektion



Das Desinfizieren eines UDAPTION®-Produktes umfasst das Abtöten vegetativer Bakterien, einiger Pilze und Viren, aber keiner Mykobakterien oder bakterieller Sporen. Es handelt sich hierbei um eine Low-Level-Desinfektion (LLD) gemäß der Klassifizierung nach Spaulding.

4.1 Vorreinigung

Reinigen Sie das Produkt gemäß den Anweisungen des Punktes 3 dieses Dokuments.

4.2 Auftragen des Desinfektionsmittels

Tragen Sie das LLD-Mittel gleichmäßig auf alle Oberflächen auf. Benutzen Sie nur LLD-Mittel die unter Punkt 5 dieses Dokuments aufgelistet sind und beachten Sie deren Anwendungshinweise.

4.3 Einwirkungszeit

Beachten Sie die Einwirkzeiten, die für das LLD-Mittel angegeben sind.

4.4 Trocknung

Trocknen Sie die Oberflächen des Produktes mittels Einwegtüchern. Lufttrocknung nur bei einer Alkohollösung empfohlen.

4.5 Montage

Montieren Sie nun das Produkt gemäß der zugehörigen Montageanleitung.

5. Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Bei allen verwendeten Mitteln sind zwingend die Anweisungen des Herstellers zu beachten! Grundsätzlich können alle Flächendesinfektionsmittel genutzt werden, die für Klinikanwendungen freigegeben sind.

5.1 Reinigungsmittel

- Enzymreiniger
- Allzweckreiniger

5.2 Desinfektionsmittel

- 60 bis 90% Ethanol / Propanol (optimal 70%)
z.B. Bacillol AF von Paul Hartmann AG

Quelle: Bundesgesundheitsblatt 2017 60:1274-1297 Empfehlung des RKI

INSORS® GMBH



Struthof 2
55595 Münchwald / Germany



+49 6706 915 1630



+49 6706 915 1640



udaption@insors.de



www.udaption.com