

Directrices de limpieza y desinfección



Tabla de contenido

1. Clasificación	Página 2
2. Ciclos de aplicación	Página 2
3. Limpieza	Página 2
4. Desinfección	Página 3
5. Detergentes y desinfectantes	Página 3

1. Clasificación

Los productos de la serie UDAPTION® son «productos sanitarios no críticos». Están destinados a aplicaciones en las que el usuario solo entra en contacto con la piel intacta y no con las mucosas.

2. Ciclos de aplicación

Dependiendo del entorno y de la intensidad de uso, pueden producirse diferentes tipos y niveles de suciedad. En principio, toda suciedad que suponga un riesgo para la salud de los usuarios y/o la seguridad funcional del producto debe eliminarse inmediatamente.

Se recomienda una limpieza periódica a intervalos mensuales aunque no se aprecie suciedad externa. La limpieza y posterior desinfección son obligatorias si se vuelve a utilizar la ayuda (se pasa a un usuario posterior).

3. Limpieza



La limpieza de un producto UDAPTION® consiste en eliminar la suciedad adherida (como sangre, proteínas, polvo, grasa/aceite y otros), normalmente con agua mezclada con agente limpiador, de las superficies, hendiduras, ranuras y conectores. En este contexto, se pueden utilizar paños y cepillos con cerdas naturales (sin cerdas metálicas).

3.1 Desmontaje del producto

Si el producto UDAPTION® es desmontable (véanse las instrucciones de «Montaje y funcionamiento» del producto), deberá desmontarse en sus componentes antes de proceder a su limpieza. El desmontaje sólo afecta a las partes que pueden separarse SIN HERRAMIENTAS. Todas las juntas sólo deben limpiarse externamente; las mitades de las juntas no deben separarse entre sí.

3.2 Pre-limpieza

Elimine la suciedad gruesa con un paño húmedo, un cepillo o similar.

3.3 Limpieza

Rocíe todas las piezas con una solución limpiadora y limpie todas las superficies con un paño.

3.4 Enjuagar

A continuación, aclare todas las piezas con agua para eliminar cualquier residuo de la solución limpiadora.

3.5 Secado

Seque todas las partes cuidadosamente después. Use paños sin pelusas para este propósito o toallas de papel desechables.

3.6 Montaje

Instale ahora el producto según las instrucciones de montaje correspondientes, si no hay se desea/es necesaria una desinfección posterior.

4. Desinfección



La desinfección de un producto UDAPTION® implica la eliminación de bacterias vegetativas, algunos hongos y virus, pero no de microbacterias ni esporas bacterianas. Se trata de una desinfección de bajo nivel (LLD) según la clasificación de Spaulding.

4.1 Pre-limpieza

Limpie el producto según las instrucciones del punto 3 de este documento.

4.2 Aplicación del desinfectante

Aplique el agente LLD uniformemente en todas las superficies. Utilice únicamente los agentes LLD enumerados en el punto 5 de este documento y siga sus instrucciones de aplicación.

4.3 Tiempo de exposición

Respete los tiempos de exposición especificados para el agente LLD.

4.4 Secado

Seque las superficies del producto con paños desechables. El secado al aire sólo se recomienda con una solución alcohólica.

4.5 Montaje

A continuación, instale el producto siguiendo las instrucciones de instalación correspondientes.

5. Detergentes y desinfectantes

Deben observarse las instrucciones del fabricante para todos los agentes utilizados!
En principio, pueden utilizarse todos los desinfectantes de superficies autorizados para su uso en hospitales.

5.1 Agentes de limpieza

- Limpiador enzimático
- Limpiador Multiusos

5.2 Desinfectante

- 60 a 90% de Etanol / Propanol (óptimo 70%)
por ejemplo, Bacillol AF de Paul Hartmann AG

Fuente: Boletín de Salud Federal 2017 60:1274-1297 Recomendación RKI

INSORS® GMBH



Struthof 2
55595 Münchwald / Germany



+49 6706 915 1630



+49 6706 915 1640



udaption@insors.de



www.udaption.com