

Puhdistus- ja desinfiointiohjeet



Sisällysluettelo

1. Luokitus	Sivu 2
2. Täytäntöönpanosykli	Sivu 2
3. Puhdistus	Sivu 2
4. Desinfiointi	Sivu 3
5. Pesu- ja desinfiointiaineet	Sivu 3

1. Luokitus

UDAPTION®-sarjan tuotteet ovat ”ei-kriittisiä lääkinnällisiä laitteita”.

Ne on tarkoitettu sovelluksiin, joissa käyttäjä joutuu kosketuksiin vain ehjän ihon eikä limakalvojen kanssa.

2. Täytäntöönpanosykli

Ympäristöstä ja käytön intensiteetistä riippuen voi esiintyä erityyppistä ja -tasoista likaantumista. Periaatteessa kaikki likaantuminen, joka aiheuttaa riskin käyttäjien terveydelle ja/tai tuotteen toiminnalliselle turvallisuudelle, on poistettava välittömästi.

Säännöllinen puhdistus kuukausittain on suositeltavaa, vaikka ulkoista likaantumista ei olisikaan näkyvissä.

Puhdistus ja sen jälkeinen desinfiointi on pakollista, jos apuvälinettä käytetään uudelleen (luovutetaan seuraavalle käyttäjälle).

3. Puhdistus



UDAPTION®-tuotteen puhdistamiseen kuuluu tarttuneen lian (kuten veren, proteiinien, pölyn, rasvan/öljyn ja muiden) poistaminen pinnoilta, raoista, urista ja liittimistä yleensä puhdistusaineeseen sekoitetulla vedellä. Tässä yhteydessä voidaan käyttää liinoja ja harjaksia, joissa on luonnonharjakset (ei metalliharjaksia).

3.1 Tuotteen purkaminen

Jos UDAPTION®-tuote on irrotettava tuote (katso tuotteen ”Kokoonpano ja käyttö” -ohjeet), se on purettava osiinsa ennen puhdistusta. Purkaminen koskee vain osia, jotka voidaan erottaa TOOL-FREE. Kaikki liitokset on puhdistettava vain ulkoisesti; liitoksen puolikkaita ei saa irrottaa toisistaan.

3.2 Esipuhdistus

Poista karkea lika kostealla liinalla, harjalla tai vastaavalla.

3.3 Puhdistus

Suihkuta kaikki osat puhdistusliuksella ja pyyhi kaikki pinnat liinalla.

3.4 Huuhtelevä pois

Huuhtelevä sitten kaikki osat vedellä puhdistusliuksen jäämien poistamiseksi.

3.5 Kuivaus

Kuivaa sitten kaikki osat huolellisesti. Käytä nukkaamattomia liinoja tai kertakäyttöisiä paperipyyhkeitä.

3.6 Kokoonpano

Asenna tuote nyt asiaankuuluvien asennusohjeiden mukaisesti, jos jälkidesinfiointia ei haluta/tarvita.

4. Desinfiointi



UDAPTION®-tuotteen desinfiointi tappaa kasvulliset bakteerit, jotkut sienet ja virukset, mutta ei mykobakteereja tai bakteerien itiöitä. Tämä on Spauldingin luokituksen mukainen matalan tason desinfiointi (LLD).

4.1 Esipuhdistus

Puhdista tuote tämän asiakirjan kohdassa 3 annettujen ohjeiden mukaisesti.

4.2 Desinfiointiaineen levittäminen

Levitä LLD-ainetta tasaisesti kaikille pinnoille. Käytä vain tämän asiakirjan kohdassa 5 lueteltuja LLD-ainetta ja noudata niiden käyttöohjeita.

4.3 Altistusaika

Noudata LLD-ainetta varten määritettyjä altistusaikoja.

4.4 Kuivuminen

Kuivaa tuotteen pinnat kertakäyttöisillä liinoilla. Ilmakuivausta suositellaan vain alkoholiliuosta suositellaan.

4.5 Kokoaminen

Kokoa tuote nyt asiaankuuluvien kokoonpano-ohjeiden mukaisesti.

5. Pesu- ja desinfiointiaineet

Kaikkien käytettävien aineiden osalta on noudatettava valmistajan ohjeita!

Periaatteessa voidaan käyttää kaikkia sairaaloissa käytettäväksi hyväksyttyjä pintadesinfiointiaineita.

5.1 Puhdistusaineet

- Entsyymipuhdistusaine
- Yleispuhdistusaine

5.2 Desinfiointiaine

- 60-90% Etanoli / Propanoli (optimaalinen 70%)
esim. Bacillol AF Paul Hartmann AG:lta

Lähde: Liittovaltion Terveyslehti 2017 60:1274-1297 RKI-suositus

INSORS® GMBH



Struthof 2
55595 Münchwald / Germany



+49 6706 915 1630



+49 6706 915 1640



udaption@insors.de



www.udaption.com