

Directives de nettoyage et de désinfection



Table des matières

1. Classification	Page 2
2. Cycles de mise en œuvre	Page 2
3. Nettoyage	Page 2
4. Désinfection	Page 3
5. Produits de nettoyage et de désinfection	Page 3

1. Classification

Les produits de la série UDAPTION® sont des « dispositifs médicaux non critiques ». Ils sont destinés à des applications dans lesquelles les utilisateurs ne sont en contact qu'avec une peau intacte et non avec des muqueuses.

2. Cycles de mise en œuvre

Le type et l'ampleur des salissures varient en fonction de l'environnement et de l'intensité d'utilisation. En principe, toutes les salissures qui représentent un danger pour la santé des utilisateurs et/ou pour la sécurité de fonctionnement du produit doivent être immédiatement éliminées.

Un nettoyage régulier à intervalles mensuels est recommandé même si aucune salissure extérieure n'est visible.

En cas de réutilisation (transmission du moyen auxiliaire à un nouvel utilisateur), le nettoyage suivi d'une désinfection est obligatoire.

3. Nettoyage



Le nettoyage d'un produit UDAPTION® comprend l'élimination des salissures adhérentes (comme le sang, les protéines, la poussière, la graisse/huile et autres), généralement avec de l'eau additionnée de détergent, sur les surfaces, les fentes, les rainures et les raccords. Dans ce contexte, des chiffons et des brosses à poils naturels (pas de poils métalliques) peuvent être utilisés.

3.1 Démontage du produit

Si le produit UDAPTION® est un produit démontable (voir les instructions « Montage et utilisation » du produit), il doit être démonté en ses composants avant le nettoyage. Le démontage ne concerne que les pièces qui doivent être séparées **SANS OUTIL**. Toutes les articulations doivent être nettoyées uniquement à l'extérieur, les moitiés d'articulation ne doivent pas être séparées les unes des autres.

3.2 Pré-nettoyage

Enlevez les grosses salissures à l'aide d'un chiffon humide, d'une brosse ou d'un objet similaire.

3.3 Nettoyage

Vaporisez toutes les pièces avec une solution de nettoyage et passez un chiffon sur toutes les surfaces.

3.4 Rinçage

Rincez ensuite toutes les pièces à l'eau afin d'éliminer les résidus de la solution de nettoyage.

3.5 Séchage

Séchez ensuite soigneusement toutes les pièces. Utilisez pour cela des chiffons non pelucheux ou des serviettes en papier jetables.

3.6 Montage

Montez maintenant le produit conformément aux instructions de montage correspondantes, si aucune désinfection ultérieure n'est souhaitée/nécessaire.

4. Désinfection



La désinfection d'un produit UDAPTION® implique la destruction des bactéries végétatives, de certains champignons et virus, mais pas des mycobactéries ou des spores bactériennes. Il s'agit d'une désinfection de bas niveau (LLD) selon la classification de Spaulding.

4.1 Nettoyage préalable

Nettoyer le produit conformément aux instructions du point 3 de ce document..

4.2 Application du désinfectant

Appliquez le produit LLD de manière uniforme sur toutes les surfaces. N'utilisez que les produits LLD énumérés au point 5 du présent document et respectez leurs instructions d'utilisation.

4.3 Temps d'action

Respectez les temps d'action indiqués pour le produit LLD.

4.4 Séchage

Séchez les surfaces du produit à l'aide de chiffons jetables. Le séchage à l'air libre n'est recommandé que pour une solution alcoolisée.

4.5 Montage

Montez maintenant le produit conformément aux instructions de montage correspondantes.

5. Produits de nettoyage et de désinfection

Pour tous les produits utilisés, il est impératif de respecter les instructions du fabricant !
En principe, tous les désinfectants de surface autorisés pour les applications cliniques peuvent être utilisés.

5.1 Produits de nettoyage

- Nettoyant enzymatique
- Nettoyant universel

5.2 Désinfectant

- 60 à 90% éthanol / propanol (optimal 70%)
par ex. Bacillol AF de Paul Hartmann AG

Source : Bundesgesundheitsblatt 2017 60:1274-1297 Recommendation du RKI

INSORS® GMBH



Struthof 2
55595 Münchwald / Germany



+49 6706 915 1630



+49 6706 915 1640



udaption@insors.de



www.udaption.com