

Tisztítási és fertőtlenítési irányelvek



Tartalomjegyzék

1. Osztályozás	Oldal 2
2. Végrehajtási ciklusok	Oldal 2
3. Tisztítás	Oldal 2
4. Fertőtlenítés	Oldal 3
5. Tisztító- és fertőtlenítőszerek	Oldal 3

1. Osztályozás

Az UDAPTION® sorozat termékei „nem kritikus orvostechikai eszközök”.

Olyan alkalmazásokra szánják őket, amelyek során a felhasználó csak az ép bőrrel érintkezik, a nyálkahártyával nem.

2. Végrehajtási ciklusok

A környezettől és a használat intenzitásától függően különböző típusú és szintű szennyeződések fordulhatnak elő. Alapvetően minden olyan szennyeződést, amely veszélyezteti a felhasználók egészségét és/vagy a termék funkcionális biztonságát, azonnal el kell távolítani.

A havi rendszerességgel történő rendszeres tisztítás akkor is ajánlott, ha külső szennyeződés nem látható.

A tisztítás és az azt követő fertőtlenítés kötelező, ha a segédeszközt újra használják (továbbadják a következő felhasználónak).

3. Tisztítás



Az UDAPTION® termék tisztítása a megtapadt szennyeződések (például vér, fehérjék, por, zsír/olaj és egyéb szennyeződések) eltávolítását jelenti, általában tisztítószerrel kevert vízzel, a felületekről, résekből, hornyokból és csatlakozókból. Ebben az összefüggésben természetes sörtékkel (fémsörték nélkül) ellátott rongyok és kefék használhatók.

3.1 A termék szétszerelése

Ha az UDAPTION® termék szétszerelhető termék (lásd a termékre vonatkozó „Összeszerelési és üzemeltetési” utasításokat), akkor tisztítás előtt alkatrészeire kell szétszedni. A szétszerelés csak azokra az alkatrészekre vonatkozik, amelyek SZERELÉKMENTESEN szétválaszthatók.

Minden illesztést csak kívülről szabad tisztítani; az illesztési feleket nem szabad egymástól elválasztani.

3.2 Előtisztítás

Távolítsa el a durva szennyeződések nedves ruhával, kefével vagy hasonlóval.

3.3 Tisztítás

Permetezze be az összes alkatrészt tisztítóoldattal, és törölje át az összes felületet egy ronggyal.

3.4 Öblítse le

Ezután öblítse le az összes alkatrészt vízzel, hogy eltávolítsa a tisztítóoldat maradványait.

3.5 Szárítás

Ezután minden alkatrészt gondosan szárítson meg. Használjon szőszmentes kendőt vagy eldobható papírtörölkőt.

3.6 Összeszerelés

Most szerelje be a terméket a vonatkozó szerelési utasításoknak megfelelően, ha utólagos fertőtlenítés nem kívánatos/szükséges.

4. Fertőtlenítés



Az UDAPTION® termék fertőtlenítése a vegetatív baktériumok, néhány gomba és vírus elpusztítását jelenti, de a mikrobaktériumokat és a baktériumspórákat nem. Ez a Spaulding-osztályozás szerint alacsony szintű fertőtlenítés (LLD).

4.1 Előtisztítás

Tisztítsa meg a terméket a jelen dokumentum 3. pontjában leírtak szerint.

4.2 A fertőtlenítőszer alkalmazása

Vigye fel egyenletesen az LLD szert minden felületre. Csak az e dokumentum 5. pontjában felsorolt LLD szereket használja, és tartsa be az alkalmazási utasításokat.

4.3 Kapcsolattartási idő

Tartsa be az LLD szerre meghatározott expozíciós időket.

4.4 Szárítás

Szárítsa meg a termék felületeit eldobható kendővel. Légszárítás csak alkoholos oldattal ajánlott.

4.5 Összeszerelés

Most szerelje össze a terméket a megfelelő összeszerelési útmutató szerint.

5. Tisztító- és fertőtlenítőszer

Minden felhasznált szer esetében be kell tartani a gyártó utasításait!

Elvileg minden, a kórházakban használatra engedélyezett felületfertőtlenítő szer használható.

5.1 Tisztítószer

- Enzimes tisztítószer
- Általános tisztítószer

5.2 Fertőtlenítőszer

- 60-90%-os etanol / propán (optimális esetben 70%-os)
pl. Bacillol AF a Paul Hartmann AG-tól

Forrás: Bundesgesundheitsblatt 2017 60:1274-1297 Az RKI ajánlása.

INSORS® GMBH



Struthof 2
55595 Münchwald / Germany



+49 6706 915 1630



+49 6706 915 1640



udaption@insors.de



www.udaption.com