

Linee guida per la pulizia e la disinfezione



Indice dei contenuti

| | |
|-------------------------------|----------|
| 1. Classificazione | Pagina 2 |
| 2. Cicli di implementazione | Pagina 2 |
| 3. La pulizia | Pagina 2 |
| 4. Disinfezione | Pagina 3 |
| 5. Detergenti e disinfettanti | Pagina 3 |

1. Classificazione

I prodotti della serie UDAPTION® sono “dispositivi medici non critici”.

Sono destinati ad applicazioni in cui l'utente entra in contatto solo con la pelle intatta e non con le mucose.

2. Cicli di implementazione

A seconda dell'ambiente e dell'intensità di utilizzo, possono verificarsi diversi tipi e livelli di sporco. In linea di principio, tutti gli imbrattamenti che rappresentano un rischio per la salute degli utenti e/o per la sicurezza funzionale del prodotto devono essere rimossi immediatamente. Si raccomanda una pulizia regolare a intervalli mensili anche se non è visibile alcuno sporco esterno. La pulizia e la successiva disinfezione sono obbligatorie se l'ausilio viene riutilizzato (ceduto a un utente successivo).

3. La pulizia



La pulizia di un prodotto UDAPTION® comporta la rimozione dello sporco aderente (come sangue, proteine, polvere, grasso/olio e altro), di solito con acqua mista a detergente, da superfici, fessure, scanalature e connettori. In questo contesto, si possono utilizzare panni e spazzole con setole naturali (senza setole metalliche).

3.1 Smontaggio del prodotto

Se il prodotto UDAPTION® è un prodotto smontabile (vedere le istruzioni “Montaggio e funzionamento” del prodotto), deve essere smontato nei suoi componenti prima della pulizia. Lo smontaggio riguarda solo le parti che possono essere separate senza attrezzi. Tutti i giunti devono essere puliti solo esternamente; le metà dei giunti non devono essere separate l'una dall'altra.

3.2 Pre-pulizia

Rimuovere lo sporco grossolano con un panno umido, una spazzola o simili.

3.3 Pulizia

Spruzzare tutte le parti con una soluzione detergente e pulire tutte le superfici con un panno.

3.4 Risciacquare

Sciacquare quindi tutte le parti con acqua per rimuovere i residui della soluzione detergente.

3.5 Asciugatura

Asciugare accuratamente tutte le parti. Utilizzare panni privi di lanugine o carta assorbente monouso.

3.6 Montaggio

Se non si desidera o non è necessaria una disinfezione successiva, installare il prodotto secondo le relative istruzioni di montaggio.

4. Disinfezione



La disinfezione di un prodotto UDAPTION® comporta l'eliminazione dei batteri vegetativi, di alcuni funghi e virus, ma non di microrganismi o spore batteriche. Si tratta di una disinfezione a basso livello (LLD) secondo la classificazione di Spaulding.

4.1 Pre-pulizia

Pulire il prodotto secondo le istruzioni riportate al punto 3 del presente documento.

4.2 Applicazione del disinfettante

Applicare l'agente LLD in modo uniforme su tutte le superfici. Utilizzare solo gli agenti LLD elencati al punto 5 del presente documento e rispettare le relative istruzioni di applicazione.

4.3 Tempo di esposizione

Rispettare i tempi di esposizione specificati per l'agente LLD.

4.4 Asciugatura

Asciugare le superfici del prodotto utilizzando panni monouso. L'asciugatura all'aria è consigliata solo con una soluzione alcolica.

4.5 Montaggio

Assemblare il prodotto seguendo le relative istruzioni di montaggio.

5. Detergenti e disinfettanti

Per tutti gli agenti utilizzati è necessario rispettare le istruzioni del produttore!

In linea di principio, è possibile utilizzare tutti i disinfettanti per superfici approvati per l'uso negli ospedali.

5.1 Agenti di pulizia

- Detergente enzimatico
- Detergente multiuso

5.2 Desinfektionsmittel

- 60-90% etanolo / propanolo (in modo ottimale 70%)
ad es. Bacillol AF di Paul Hartmann AG

Fonte: Bundesgesundheitsblatt 2017 60:1274-1297 Raccomandazione dell'RKI

INSORS® GMBH



Struthof 2
55595 Münchwald / Germany



+49 6706 915 1630



+49 6706 915 1640



udaption@insors.de



www.udaption.com