

Richtlijnen voor reiniging en desinfectie



Inhoudsopgave

1. Classificatie	Pagina 2
2. Implementatiecycli	Pagina 2
3. Schoonmaken	Pagina 2
4. Desinfectie	Pagina 3
5. Reinigings- en Ontsmettingsmiddelen	Pagina 3

1. Classificatie

De producten uit de UDAPTION®-serie zijn „niet-kritieke medische hulpmiddelen“. Ze zijn bedoeld voor toepassingen waarbij de gebruiker alleen in contact komt met de intacte huid en niet met slijmvliezen.

2. Implementatiecycli

Afhankelijk van de omgeving en de gebruikintensiteit kunnen er verschillende soorten en niveaus van vervuiling optreden. In principe moet alle vervuiling die een risico vormt voor de gezondheid van gebruikers en/of de functionele veiligheid van het product onmiddellijk worden verwijderd. Regelmatige reiniging met maandelijkse intervallen wordt aanbevolen, zelfs als er geen uitwendige vervuiling zichtbaar is. Reiniging en daaropvolgende desinfectie is verplicht als het hulpmiddel opnieuw wordt gebruikt (doorgegeven aan een volgende gebruiker).

3. Schoonmaken



Het reinigen van een UDAPTION® product bestaat uit het verwijderen van aanhechtend vuil (zoals bloed, eiwitten, stof, vet/olie en andere), meestal met water vermengd met reinigingsmiddel, van oppervlakken, spleten, groeven en aansluitingen. In deze context kunnen doeken en borstels met natuurlijke haren (geen metalen haren) worden gebruikt.

3.1 Demontage van het product

Als het UDAPTION® product een demonteerbaar product is (zie de instructies voor „Montage en bediening“ van het product), moet het in zijn onderdelen worden gedemonteerd voordat het wordt gereinigd. Demontage betreft alleen de onderdelen die GereedschapsVRIJ kunnen worden gescheiden. Alle verbindingstukken mogen alleen uitwendig worden gereinigd; de verbindingshelften mogen niet van elkaar worden gescheiden.

3.2 Voorreiniging

Verwijder grof vuil met een vochtige doek of met een borstel of vergelijkbaar.

3.3 Schoonmaken

Bespuit alle onderdelen met een schoonmaakmiddel en veeg ze af met een doek alle oppervlakken.

3.4 Spoelen

Spoel vervolgens alle onderdelen af met water om alle resten van de reinigingsoplossing te verwijderen.

3.5 Drogen

Droog vervolgens alle onderdelen zorgvuldig af. Gebruik hiervoor een pluisvrije doek of papieren wegwerphanddoeken.

3.6 Montage

Zet het product nu in elkaar volgens de bijbehorende montagehandleiding, als er geen desinfectie achteraf gewenst/noodzakelijk is.

4. Desinfectie



Bij het desinfecteren van een UDAPTION® product worden vegetatieve bacteriën, sommige schimmels en virussen gedood, maar geen mycobacteriën of bacteriesporen. Dit is een laag niveau desinfectie (LLD) volgens de Spaulding classificatie.

4.1 Voorreiniging

Reinig het product volgens de instructies in punt 3 van dit document.

4.2 Het desinfectiemiddel aanbrengen

Breng het LLD-middel gelijkmatig aan op alle oppervlakken. Gebruik alleen LLD-middel, vermeld in hoofdstuk 5 van dit document en neem de gebruiksaanwijzingen in acht.

4.3 Belichtingstijd

Neem de voor het LLD-middel gespecificeerde blootstellingstijden in acht.

4.4 Drogen

Droog de oppervlakken van het product met wegwerpdoeken. Alleen aan de lucht drogen met een Alcoholoplossing aanbevolen.

4.5 Montage

Installeer het product nu volgens de bijbehorende installatie-instructies.

5. Reinigings- en Ontsmettingsmiddelen

Voor alle gebruikte producten moeten de instructies van de fabrikant worden opgevolgd!
In principe kunnen alle desinfectiemiddelen voor oppervlakken worden gebruikt die zijn goedgekeurd voor gebruik in ziekenhuizen.

5.1 Reinigingsmiddelen

- Enzymreiniger
- Allesreiniger

5.2 Desinfectiemiddel

- 60 tot 90% ethanol / propanol (optimaal 70%)
bijv. Bacillol AF van Paul Hartmann AG

Bron: Bundesgesundheitsblatt 2017 60:1274-1297 Aanbeveling van de RKI

INSORS® GMBH



Struthof 2
55595 Münchwald / Germany



+49 6706 915 1630



+49 6706 915 1640



udaption@insors.de



www.udaption.com