

Retningslinjer for rengjøring og desinfeksjon



Innholdsfortegnelse

1. Klassifisering	Side 2
2. Implementeringssykluser	Side 2
3. Rengjøring	Side 2
4. Desinfeksjon	Side 3
5. Rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler	Side 3

1. Klassifisering

Produktene i UDAPTION®-serien er „ikke-kritisk medisinsk utstyr“.

De er beregnet på bruksområder der brukeren kun kommer i kontakt med intakt hud og ikke med slimhinner.

2. Implementeringssykluser

Avhengig av miljø og bruksintensitet kan det oppstå ulike typer og grader av tilsmussing. I prinsippet må all tilsmussing som utgjør en risiko for brukernes helse og/eller produktets funksjonssikkerhet, fjernes umiddelbart.

Regelmessig rengjøring med månedlige intervaller anbefales selv om det ikke er synlig utvendig tilsmussing.

Rengjøring og påfølgende desinfeksjon er obligatorisk hvis hjelpemiddelet skal brukes på nytt (gis videre til en senere bruker).

3. Rengjøring



Rengjøring av et UDAPTION®-produkt innebærer å fjerne vedheftende smuss (som blod, proteiner, støv, fett/olje og annet), vanligvis med vann blandet med rengjøringsmiddel, fra overflater, sprekker, riller og kontakter. I denne sammenhengen kan det brukes kluter og børster med naturbust (ingen metallbust).

3.1 Demontering av produktet

Hvis UDAPTION® -produktet er et demonterbart produkt (se „Montering og bruk“ for produktet), må det demonteres i sine enkeltdeler før rengjøring. Demonteringen gjelder kun de delene som kan skilles fra hverandre uten bruk av verktøy. Alle skjøter må kun rengjøres utvendig; skjøtehalvdelene må ikke skilles fra hverandre.

3.2 Forrengjøring

Fjern grov tilsmussing med en fuktig klut eller ved hjelp av en børste eller lignende.

3.3 Rengjøring

Spray alle delene med en rengjøringsløsning, og tørk over med en klut alle overflater.

3.4 Skylling

Skyll deretter alle delene med vann for å fjerne eventuelle rester av rengjøringsløsningen.

3.5 Tørking

Tørk deretter alle delene forsiktig. Bruk en lofri klut til dette eller engangspapirhåndklær.

3.6 Montering

Monter nå produktet i henhold til den tilhørende monteringsanvisningen, hvis ingen påfølgende desinfeksjon er ønsket/nødvendig.

4. Desinfeksjon



Desinfisering av et UDAPTION®-produkt innebærer å drepe vegetative bakterier, noen sopparter og virus, men ingen mykobakterier eller bakteriesporer. Dette er en lavnivådesinfeksjon (LLD) i henhold til Spaulding-klassifiseringen.

4.1 Forrengjøring

Rengjør produktet i henhold til instruksjonene i punkt 3 i dette dokumentet.

4.2 Påføring av desinfeksjonsmiddelet

Påfør LLD-middelet jevnt på alle overflater. Bruk kun LLD-middel som er oppført i avsnitt 5 i dette dokumentet, og følg bruksanvisningen for disse notater.

4.3 Eksponeringstid

Overhold eksponeringstidene som er angitt for LLD-middelet.

4.4 Tørking

Tørk overflatene på produktet med engangskluter. Lufttørking kun med en Alkoholløsning anbefales.

4.5 Montering

Installer nå produktet i henhold til de tilhørende installasjonsinstruksjonene.

5. Rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler

Produsentens anvisninger må følges for alle produkter som brukes!

I prinsippet kan alle overflatedesinfeksjonsmidler som er godkjent for bruk i sykehus, brukes.

5.1 Rengjøringsmidler

- Enzymrengjøringsmiddel
- Universalrengjøringsmiddel

5.2 Desinfeksjonsmiddel

- 60 til 90 % etanol/propanol (optimalt 70 %)
f.eks. Bacillol AF fra Paul Hartmann AG

Kilde: Bundesgesundheitsblatt 2017 60:1274-1297 Anbefaling fra RKI

INSORS® GMBH



Struthof 2
55595 Münchwald / Germany



+49 6706 915 1630



+49 6706 915 1640



udaption@insors.de



www.udaption.com