

# Orientações para a limpeza e desinfeção



## Índice

---

1. Classificação	Página 2
2. Ciclos de implementação	Página 2
3. Limpeza	Página 2
4. Desinfeção	Página 3
5. Produtos de limpeza e Desinfectantes	Página 3

# 1. Classificação

Os produtos da série UDAPTION® são „dispositivos médicos não críticos“.

Destinam-se a aplicações em que o utilizador apenas entra em contacto com a pele intacta e não com as membranas mucosas.

## 2. Ciclos de implementação

Dependendo do ambiente e da intensidade de utilização, podem ocorrer diferentes tipos e níveis de sujidade. Em princípio, qualquer sujidade que represente um risco para a saúde dos utilizadores e/ou para a segurança funcional do produto deve ser imediatamente removida.

Recomenda-se uma limpeza regular a intervalos mensais, mesmo que não seja visível qualquer sujidade exterior.

A limpeza e a desinfeção subsequente são obrigatórias se o aparelho for reutilizado (transmitido a um utilizador posterior).

## 3. Limpeza



A limpeza de um produto UDAPTION® envolve a remoção de sujidade aderente (como sangue, proteínas, pó, gordura/óleo e outros), normalmente com água misturada com agente de limpeza, das superfícies, fendas, ranhuras e conectores. Neste contexto, podem ser utilizados panos e escovas com cerdas naturais (sem cerdas metálicas).

### 3.1 Desmontagem do produto

Se o produto UDAPTION® for um produto desmontável (ver instruções de „Montagem e funcionamento“ do produto), deve ser desmontado nas suas partes componentes antes da limpeza. A desmontagem diz respeito apenas às peças que podem ser separadas SEM FERRAMENTAS. Todas as juntas só podem ser limpas externamente; as metades das juntas não podem ser separadas umas das outras.

### 3.2 Pré-limpeza

Remover a sujidade mais grosseira com um pano húmido ou com uma escova ou semelhante.

### 3.3 Limpeza

Pulverizar todas as peças com uma solução de limpeza e limpar com um pano todas as superfícies.

### 3.4 Enxaguamento

Em seguida, enxagúe todas as peças com água para remover quaisquer resíduos da solução de limpeza.

### 3.5 Secagem

Em seguida, secar cuidadosamente todas as peças. Para o efeito, utilize um pano que não largue pêlos ou toalhas de papel descartáveis.

### 3.6 Montagem

Montar agora o produto de acordo com as instruções de montagem correspondentes, se não houver a desinfeção subsequente é desejada/necessária.

## 4. Desinfecção



A desinfecção de um produto UDAPTION® envolve a eliminação de bactérias vegetativas, alguns fungos e vírus, mas não de microbactérias ou esporos bacterianos. Trata-se de uma desinfecção de baixo nível (LLD) de acordo com a classificação de Spaulding.

### 4.1 Pré-limpeza

Limpar o produto de acordo com as instruções do ponto 3 do presente documento.

### 4.2 Aplicação do desinfetante

Aplicar o agente LLD uniformemente em todas as superfícies. Utilizar apenas o agente LLD indicados no ponto 5 do presente documento e respeitar as respectivas instruções de utilização notas.

### 4.3 Tempo de exposição

Respeitar os tempos de exposição especificados para o agente LLD.

### 4.4 Secagem

Secar as superfícies do produto com panos descartáveis. Secagem ao ar apenas com um recomenda-se a utilização de uma solução alcoólica.

### 4.5 Montagem

Instale agora o produto de acordo com as instruções de instalação correspondentes.

## 5. Produtos de limpeza e Desinfetantes

Para todos os produtos utilizados, devem ser respeitadas as instruções do fabricante!

Em princípio, podem ser utilizados todos os desinfetantes de superfícies aprovados para utilização em hospitais.

### 5.1 Agentes de limpeza

- Produto de limpeza enzimático
- Produto de limpeza multiusos

### 5.2 Desinfetante

- 60 a 90% de etanol / propanol (ótimo 70%)  
por exemplo, Bacillol AF da Paul Hartmann AG

Fonte: Bundesgesundheitsblatt 2017 60:1274-1297 Recomendação do RKI

INSORS® GMBH



Struthof 2  
55595 Münchwald / Germany



+49 6706 915 1630



+49 6706 915 1640



udaption@insors.de



www.udaption.com