

Rengörings- och desinfektionsriktlinjer



Innehållsförteckning

1. Klassificeringssida	Sidan 2
2. Genomförandecykler	Sidan 2
3. Rengöring	Sidan 2
4. Desinfektion	Sidan 3
5. Rengöringsmedel och desinfektionsmedel	Sidan 3

1. Klassificering

Produkter ur UDAPTION®-serien klassificeras som „icke-kritiska medicintekniska produkter“. De är avsedda för användningsfall där användarna endast kommer i kontakt med intakt hud och inte med slemhinna.

2. Genomförandecykler

Beroende på användningsmiljö och användningsintensitet uppstår varierande föroreningar vad gäller typ och omfattning. Grundläggande är att föroreningar som utgör en hälsorisk för användarna och/eller en risk för produktens funktionella säkerhet, ska omedelbart avlägsnas.

En regelbunden rengöring med månadsintervall rekommenderas även om ingen synlig smuts är uppenbar.

Vid återanvändning (vidarebefordran av hjälpmedlet till en följande användare) är rengöring följt av desinfektion obligatoriskt.

3. Rengöring



Att rengöra en UDAPTION®-produkt innebär att ta bort fastsittande smuts (såsom blod, proteiner, damm, fett/olja och annat), vanligtvis med vatten där rengöringsmedel tillsatts, på ytor, springor, spår och kopplingar. I detta sammanhang kan trasor och borstar med naturborst (inga metallborst) användas.

3.1 Demontering av produkten

Om UDAPTION®-produkten är en demonterbar produkt (se instruktionen „Montering och drift“ för produkten) måste den demonteras i sina delar innan rengöring. Demontering gäller endast de delar som kan separeras utan verktyg. Alla leder ska endast rengöras utvändigt, ledhalvorna får inte separeras från varandra.

3.2 Första rengöring

Ta bort grov smuts med en fuktig trasa eller borste Liknande.

3.3 Städning

Spraya alla delar med en rengöringslösning och torka av med en trasa alla ytor.

3.4 Sköljning

Skölj sedan alla delar med vatten för att ta bort rester av rengöringslösningen.

3.5 Torkning

Torka sedan noggrant av alla delar. Använd luddfri trasa eller engångspappershanddukar.

3.6 Montering

Montera nu produkten enligt den medföljande monteringsanvisningen, om ingen efterföljande desinfektion önskas/erfordras.

4. Desinfektion



Desinfektionen av en UDAPTION®-produkt omfattar att döda vegetativa bakterier, vissa svampar och virus, men inga mykobakterier eller bakteriella sporer. Detta är en låg-nivå-desinfektion (LND) enligt Spauldings klassificering.

4.1 Förstädning

Rengör produkten enligt anvisningarna i punkt 3 i detta dokument.

4.2 Applicera desinfektionsmedlet

Applicera LND-medlet jämnt på alla ytor. Använd endast LND-medlet som är listade under punkt 5 i detta dokument och ta hänsyn till deras användning anvisningar.

4.3 Exponeringstid

Observera de verkningstider som anges för LND-medlet.

4.4 TTorkning

Torka av produktens ytor med engångsdukar. Luftrening endast vid en Alkohollösning rekommenderas.

4.5 Montering

Montera nu produkten enligt den medföljande monteringsanvisningen.

5. Rengörings- och desinfektionsmedel

När du använder något medel är det nödvändigt att alltid följa tillverkarens anvisningar! I grund och botten kan alla ytdesinfektionsmedel användas som är godkända för kliniska tillämpningar.

5.1 Rengöringsmedel

- Enzymrengöringsmedel
- Allrengöringsmedel

5.2 Desinfektionsmedel

- 60 till 90% etanol / propanol (optimalt 70%)
t.ex. Bacillol AF från Paul Hartmann AG

Källa: Bundesgesundheitsblatt 2017 60:1274-1297 Rekommendation från RKI

INSORS® GMBH



Struthof 2
55595 Münchwald / Germany



+49 6706 915 1630



+49 6706 915 1640



udaption@insors.de



www.udaption.com